

Monteringsanvisning

(N)

Bekkensele skai - Art. nr. 21012

(GB)

Mounting description 安装说明

Abduction belt leather - Item no. 21012

皮革分腿垫, 零件号 21012

(N)

Trekk beltet gjennom hoftebeltefestet som ligger vedlagt. Tre beltet tilbake gjennom belteklemmene.



(GB)

Pull the belt through the hole in the hip belt bracket. Thread the belt back through the enclosed belt clamps.
将扣带穿入臀部带扣后, 反回穿入所配带夹里



(N)

Fest hoftebeltet i det bakerste hullet i rygghengsle-braketten med den vedlagte skrue og mutter. Bruk to 13mm fastnøkler.

(GB)

Fix the hip belt bracket in the backmost hole of the backrest hinge using the enclosed screws and nuts. Use two 13mm open-end spanners.

用两把 13MM 开口扳手将臀部带扣用所附螺丝及螺母安装在靠背支架管最后一个孔上。



(N)

Selene føres fra undersiden og på innsiden av lår, og dras deretter ut til hver side av hofter.

(GB)

The straps are pulled up along the inside of the thighs, and then out to each side of the hip.
将分腿垫带沿腿部内侧上拉, 并绕到臀部两边



Låsen føres på utsiden av ryggrør og festes bak rygg.

(N)

The lock straps are placed around the backrest tubes and locked behind the backrest.

(GB)

将带子环绕在靠背后端, 扣住。

